

Fiche produit

KAdermin VET poudre spray

Espèces cibles

Toutes espèces

Utilisations

KAdermin VET permet le **contrôle optimal de l'exsudat**, participe à la **protection des atteintes cutanées** face aux infections et favorise l'**hydratation des tissus et la réparation naturelle** de la peau lors des cas suivants :

- Coupures et abrasions
- Blessures traumatiques
- Atteintes cutanées
- Atteinte cutanée exsudative
- Perte de substance

Composition

- Kaolin
- Complexe SCX powder
- Acide hyaluronique

Instructions d'utilisation

- 1 Nettoyer la peau et la sécher soigneusement avant utilisation
- 2 Bien agiter le flacon avant utilisation
- 3 Appliquer une fine couche de poudre uniquement sur la zone concernée à environ 10 cm de distance
- 4 Après avoir pulvérisé KAdermin VET recouvrir la zone pour éviter le léchage
- 5 Appliquer une fois par jour

Présentation

Flacon de **125 ml** Disponible en centrale d'achats

